

Kurzeinweisung Invacare Homefill

FÜLLEN DER SAUERSTOFFFLASCHE

Führen Sie den Füllstutzen der Flasche in die Füllöffnung des Geräts. Dazu müssen die grünen Punkte zu sehen sein



Der Anschluss rastet ein, indem der Verriegelungsring nach oben schnappt



Schalten Sie den Konzentrator **und** das Flaschenfüllgerät ein



Das Flaschenfüllgerät benötigt zunächst Sauerstoff vom unteren Gerät und steht deshalb auf „Warten“



Ist genügend Sauerstoff zum Füllen vorhanden, beginnt das Gerät automatisch mit der Befüllung



Das Gerät zeigt an, wenn die Flasche gefüllt ist. Schalten Sie dann das Flaschenfüllgerät aus.



Zum Abnehmen der O₂-Flasche drücken Sie den Verriegelungsring nach unten und ziehen die Flasche nach oben ab.



Tipp:

Die Flasche wird umso schneller gefüllt je mehr Sauerstoff vom Konzentrator an das Flaschenfüllgerät abgegeben werden kann. Einstellungen von mehr als 2L/ Minute verlangsamen den Füllvorgang.

Weitere wichtige Informationen zur Bedienung und Reinigung finden Sie in der Anleitung

Kurzeinweisung Invacare Homefill

Was gehört alles zum Gerät?



Homefill



Halterung



Sauerstoffflasche



Spiralschlauch



Tragetasche



Stromanschluss



Anleitung

Vorbereitung

Schritt 1

Setzen Sie die Halterung auf das Sauerstoffgerät



Schritt

Verriegeln Sie die Halterung



Schritt 3

Stellen Sie den Homefill in die Halterung



Zum Lösen der grünen Schutzhülse oder des Spiralschlauchs drücken sie bitte auf die silberne Entriegelungstaste (NICHT ZIEHEN)



Die beiden Kupplungen des Spiralschlauchs oben und unten in die Anschlüsse stecken. (Die Entriegelungstasten **NICHT** drücken) Die Kupplungen rasten mit einem „Klicken“ ein

