

Kurzeinweisung Inogen One G2

PFLEGE

Wöchentlich Partikelfilter kurz reinigen, Staub entfernen / absaugen



Monatlich Partikelfilter reinigen, dazu Gerät aus Tragetasche nehmen



Partikelfilter an der Vorderseite des Gerätes vorsichtig entfernen



Filter mit Flüssigseife und Wasser reinigen und trocknen lassen



Oberflächen regelmäßig abwischen



Akku mit min. 60% Ladung entfernen, falls Gerät länger als 7 Tage nicht benutzt wird



Nutzungshinweise

Betrieb stets in aufrechter Position, Temperatur zwischen 5°C bis 35°C



Keine feuchten Räume



Nicht vor einer Heizung



Lufteinlass- und Luftablass-Öffnungen dürfen nicht blockiert sein



Weitere wichtige Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung

pmt PIELMEIER
MEDIZINTECHNIK

Kurzeinweisung Inogen One G2

Was gehört alles zum Gerät?



O2-Konzentrator mit Akku, Caddy und Tragetasche



230V-Steckernetzteil



KFZ-Ladekabel



Anleitung / Informationen



O2-Brille

Vorbereitung

Laden Sie den Akku im Gerät mit dem 230V-Steckernetzteil voll auf (100%)

Hinweis: Das Gerät kann gleichzeitig geladen und benutzt werden



Laden Sie den Akku im Gerät mit dem KFZ-Ladekabel voll auf (100%)

Hinweis: Das Gerät kann gleichzeitig geladen und benutzt werden




Verbinden Sie eine O2-Brille mit dem Gerät

Hinweis: Maximale Länge der O2-Leitung 7,6m



Inbetriebnahme

Einschalten

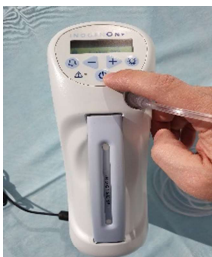

Ein akustisches Signal ertönt und alle Kontrollleuchten gehen an

Inhalieren



Setzen Sie die O2-Brille auf und atmen Sie am besten durch die Nase

Betrieb



Die grüne LED blinkt = OK, Licht für Atmungserkennung

Einstellung 1



Mit den (- oder +)Tasten stellen Sie die Flussrate (Flow) ein (Stufe 1 bis 6)

Einstellung 2



Glocke = Taste für akustische Atemerkennungswarnung (Ein oder Aus)

Rauchen verboten
Offenes Feuer verboten

