

Kurzeinweisung Invacare Perfect 02

PFLEGE

Oberflächen regelmäßig abwischen



Rückseite



Abdeckung entfernen



Filter entfernen



Filter säubern



abstauben/ absaugen/ abwaschen
(gut trocknen lassen)

Filter **trocken** einsetzen



Abdeckung aufsetzen

Aufstellung:

Zentraler Aufstellort in der Wohnung



~~Keine feuchten Räume~~



~~Nicht vor eine Heizung stellen~~



Ausreichend Abstand zur Wand
(mind. 15cm)



Weitere wichtige Informationen finden Sie
in der Bedienungsanleitung

pmt PIELMEIER
MEDIZINTECHNIK

Kurzeinweisung Invacare Perfect O2

Was gehört alles zum Gerät?



1x O2-Verlängerungsschlauch



4x O2-Brillen



1x Steckverbinder



Anleitung/ Informationen

Nur bei Bedarf



1x Befeuchterbecher

Vorbereitung

Schritt 1

Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose (keine Mehrfachsteckdose)



Schritt 2

Verbinden Sie den Verlängerungsschlauch mit dem Gerät



Schritt 3

Verbinden Sie die Verlängerung und eine O2-Brille mit dem Steckverbinder



Inbetriebnahme

Einschalten



Ein akustisches Signal ertönt und alle Kontrollleuchten gehen an

Betrieb



Die grüne LED zeigt an, dass das Gerät richtig funktioniert

Einstellung 1



Hier (am Flowmeter) stellen Sie die O2-Flussrate ein

Einstellung 2



Die schwarze Kugel zeigt an, wieviel Sauerstoff aus dem Gerät kommt (Liter pro Minute)

Inhalieren



Atmen Sie am besten durch die Nase

Rauchen verboten
Offenes Feuer verboten

